

Bolsa Para Nutrição Parenteral Gravitacional



APRESENTAÇÕES:

Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 150 mL
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 300 mL
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 500 mL
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 1000 mL
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 2000 mL
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional 3000 mL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional (Embalagem Primária) é fabricada à base de Poliéster, Polietileno e Polipropileno, transparente, flexível, estéril, apirogênica, isenta de toxicidade, impermeável a micro-organismos, resistente a vazamento, queda, pressão, compatível com a Nutrição Parenteral, nas condições normais de estocagem e submetidas à ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO.

A bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional (Embalagem Primária) é composta por um filme com três camadas distintas, cada uma com uma função singular de proteção. Juntas, estas camadas formam um filme trilaminado, com um desenho exclusivo para proteção de soluções estéreis.

Componentes do filme:

Poliéster (Camada Externa): Material com resistência ao calor, transparência e ótima resistência a esforços mecânicos e abrasivos.

Polietileno (Camada Intermediária): Proporciona excelente flexibilidade e, por suas propriedades, atua como barreira na troca de umidade e vapores entre ambientes.

Polipropileno (Camada Interna): Impermeável e com boa flexibilidade. Sua principal característica é ser quimicamente inerte. Para abrir rasgue o invólucro e retire a bolsa. A embalagem de acondicionamento individual (Saco de Papel Grau Cirúrgico), deve ser aberta somente no momento da utilização do produto, devendo ser tomados os devidos cuidados para evitar a contaminação, durante o preparo da nutrição parenteral.

INDICAÇÕES:

A bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional é indicada para manipulação, conservação, transporte e administração de nutrição parenteral, em pacientes hospitalizados.

PRECAUÇÕES

Conferir a validade do produto: 36 meses a partir da data de fabricação;

Este produto é **DESCARTÁVEL**, devendo ser utilizado apenas uma vez e **INUTILIZADO** em seguida;

Verificar se a embalagem externa (Saco de Papel Grau Cirúrgico) não foi violada;

Realizar o fechamento do tubo de preparo utilizando aparelho de rádio frequência, alicate ou pinça de fechamento definitivo.

ADVERTÊNCIAS

Fabricante recomenda uso único;

Produto estéril;

De acordo com a prescrição específica, preparar na bolsa Nutrição Parenteral, dentro das normas de higiene e com técnica adequada para evitar a contaminação durante o preparo da nutrição parenteral;

É recomendado que seja feita uma avaliação visual previamente à utilização para identificação de possíveis pontos de colapamento na bolsa.

MODO DE USAR

Verificar se a embalagem de acondicionamento individual (Saco de papel grau cirúrgico) se encontra íntegra;

De acordo com a prescrição específica, preparar na bolsa, a Nutrição Parenteral, dentro das normas de higiene e com técnica adequada;

Realizar o fechamento do tubo de preparo utilizando o aparelho de rádio frequência, alicate ou pinça de fechamento definitivo;

Fazer anotações relativas ao nome do paciente, leito, reg. hospitalar, manipulação da NP, data, hora, osmolaridade, volume, velocidade de infusão, prazo de validade e farmacêutico responsável.

No momento da administração, conferir os dados do rótulo, com os da papeleta do paciente.

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em local limpo, seco à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

DIZERES LEGAIS

ESTÉRIL. ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO

PRODUTO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO

NÃO USAR SE HOVER DETECÇÃO DE PARTÍCULAS

VERIFICAR SE A EMBALAGEM FOI VIOLADA, POIS A ESTERILIDADE PODE TER SIDO AFETADA

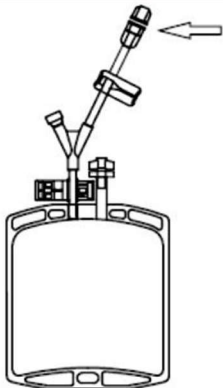
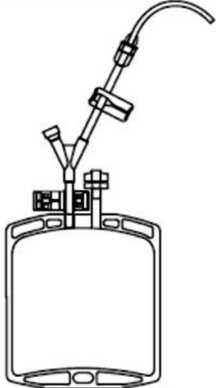
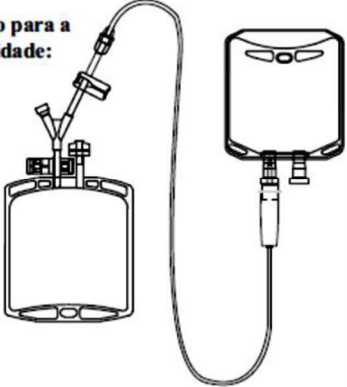
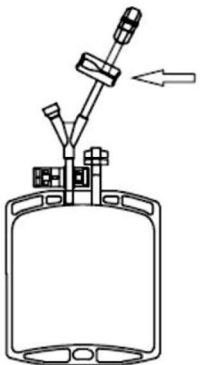
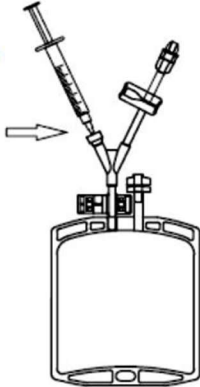

Reg. M.S nº: 80134380027
Resp. Técnico: Caroline Fagundes do Amaral Lenza
CRF-GO nº 5554



Br 153, Km 3, Conjunto Palmares, Goiânia-GO - CEP: 74775-027
C.N.P.J.: 01.571.702/0001-98 - Insc. Estadual: 10.001.621-9
sac@halexistar.com.br | www.halexistar.com.br
Tel.: (62) 3265 6500 - SAC: 0800 646 6500
Indústria Brasileira



Instruções de uso Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional

<p>1° Após retirar a bolsa do invólucro protetor, abrir a rosca de abertura/fechamento:</p> 	<p>2° Conectar a fonte de solução nutritiva/medicamento:</p> 
<p>3° Transferir a solução para a bolsa vazia por gravidade:</p> 	<p>4° Após adicionar toda solução fechar a rosca e o clamp de abertura/fechamento:</p> 
<p>5° Se necessário, adicionar medicamentos pelo ponto de injeção:</p> 	<p>6° Após a adição de todas as soluções e medicamentos fechar o clamp de fechamento definitivo:</p> 
<p>7° Após o fechamento do clamp definitivo a bolsa de nutrição parenteral estará pronta para o uso. Sendo assim, abrir a borboleta, inserir o equipo e transferir a solução para o paciente:</p> 